


頰椎前方用レトラクターシステム

ACRS-BLACK SCRUM BLADE

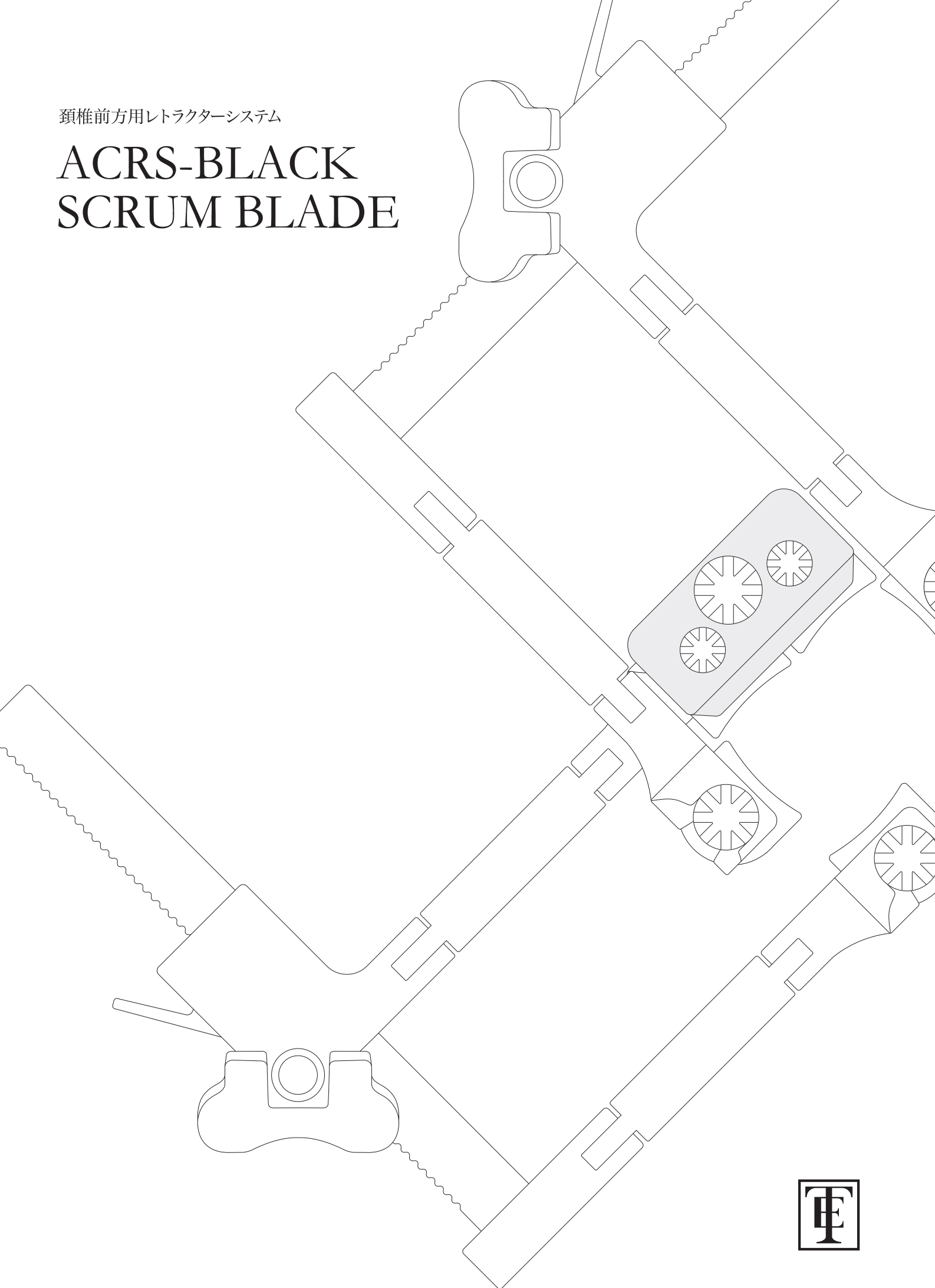

ACRS-^{*}BLACK SCRUM BLADEとは

『ACRS-BLACK SCRUM BLADE』システムは、横浜南共済病院/三原久範先生のアイデアをもとに開発された頸椎前方用のレトラクターシステムです。従来の開創器での課題となっていた食道の保護をより確実にを行うため開発されました。レトラクターフレームを四方に設置したあとに、ブレードを追加設置する事ができ、食道の保護を可能とします。

※ 頸椎前方レトラクターシステム (Anterior Cervical Retractor System)

メリット

- 1 食道保護用のブレード(スクラムブレード)を任意のサイズで追加設置が可能 (D40-60mm)
- 2 より簡易的な操作
- 3 設置後の椎間移動が可能

使用手順

1 ブレード/レトラクターフレームの設置

デプスゲージを用いて使用するブレードサイズを決定します。内外側方向・頭尾側方向の順に、ブレードをブレードハンドルと接続して設置し、レトラクターフレームで保持します。

内外側 : ギザ付ブレード/
レトラクターフレーム<ストレート>

頭尾側 : スムースブレード/
レトラクターフレーム<クランク>



⚠ レトラクターフレームとブレードが平行になるように設置してください。

2 スクラムブレードとスクラムの接続

スクラムブレードはスクラムの左右どちらのホールにも下から垂直に差し込むだけで接続可能です。接続した際に『medial』表示が内側に来るように接続してください。



3 スクラムブレードの設置

〈手順1〉


スクラムに接続したスクラムブレードで、慎重に設置位置まで食道を牽引します。

〈手順2〉



ギザ付ブレードのヘッドにスクラムブレードが設置されていないホールを上から垂直に差し込み設置します。

この時、以下の点にご注意ください。

注1) スクラム・ブレード・レトラクターフレームをなるべく直線上に設置します。

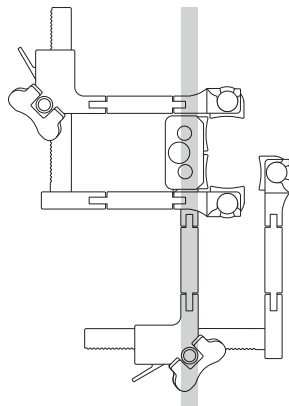

注2) 確実に設置されていることをホール上部から確認してください。

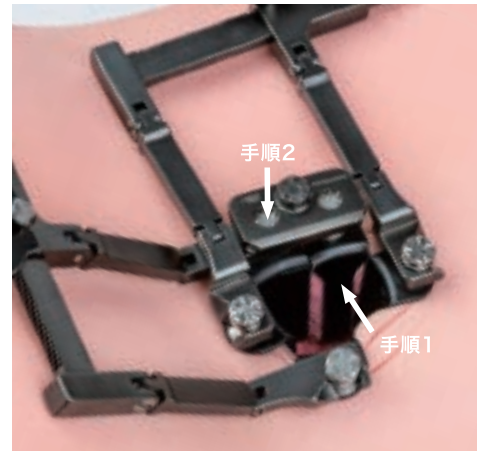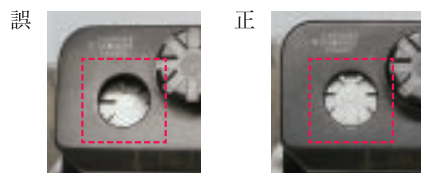


4 スクラムブレードの抜去

組織などを傷つけないように注意しながら、スクラムおよびスクラムブレードを上方向へ引くことで接続が解除されます。


ブレードとブレードハンドルの接続および解除方法

ブレードを接続／設置する際は、必要に応じてブレードハンドルをご使用ください。

○ 接続の場合

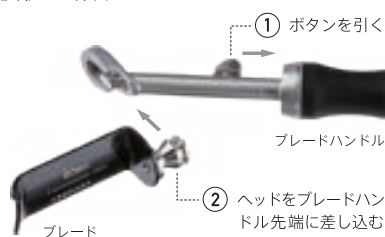

○ 解除の場合

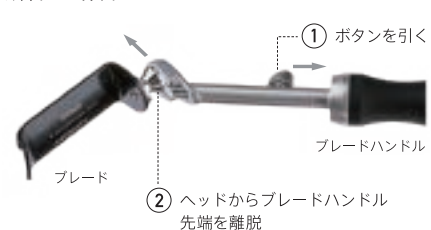



レトラクターフレーム〈ストレート〉



レトラクターフレーム〈クランク〉



デプスゲージ



ブレードハンドル



スムースブレード



ギザ付ブレード



スクラムブレード



スクラム

ACRS-BLACK SCRUM BLADE セット

| 商品コード | 商品名 | JAN コード |
|----------------|--|---------------|
| S25511308C0001 | ACRS-BLACK レトラクターフレーム〈ストレート〉 | 4580469483669 |
| S25511308C0002 | ACRS-BLACK レトラクターフレーム〈クランク〉 | 4580469483676 |
| S36201505A0002 | ACRS-BLACK デプスゲージ | 4580469483980 |
| S25601808A0001 | ACRS-BLACK ブレードハンドル | 4580469484192 |
| S25582030C0001 | ACRS-BLACK スムースブレード〈W20 mm × D30 mm〉 | 4580469484208 |
| S25582040C0001 | ACRS-BLACK スムースブレード〈W20 mm × D40 mm〉 | 4580469484215 |
| S25582050C0001 | ACRS-BLACK スムースブレード〈W20 mm × D50 mm〉 | 4580469484222 |
| S25582060C0001 | ACRS-BLACK スムースブレード〈W20 mm × D60 mm〉 | 4580469484239 |
| S25582070C0001 | ACRS-BLACK スムースブレード〈W20 mm × D70 mm〉 | 4580469484246 |
| S25582030B0001 | ACRS-BLACK ギザ付ブレード〈W20 mm × D30 mm〉 | 4580469484253 |
| S25582040B0001 | ACRS-BLACK ギザ付ブレード〈W20 mm × D40 mm〉 | 4580469484260 |
| S25582050B0001 | ACRS-BLACK ギザ付ブレード〈W20 mm × D50 mm〉 | 4580469484277 |
| S25582060B0001 | ACRS-BLACK ギザ付ブレード〈W20 mm × D60 mm〉 | 4580469484284 |
| S25582070B0001 | ACRS-BLACK ギザ付ブレード〈W20 mm × D70 mm〉 | 4580469484291 |
| S25581040A0002 | ACRS-BLACK スクラムブレード〈ハーフ/W10 mm × D40 mm〉 | 4582145343069 |
| S25581050A0003 | ACRS-BLACK スクラムブレード〈ハーフ/W10 mm × D50 mm〉 | 4582145343052 |
| S25581060A0002 | ACRS-BLACK スクラムブレード〈ハーフ/W10 mm × D60 mm〉 | 4582145343076 |
| S40900405W0006 | ACRS-BLACK スクラム | 4580469488275 |
| S41080202B0001 | ACRS-BLACK 滅菌ケース | 4580469486929 |

届出番号：13B1X00274000164 販売名：脊椎手術用器械

永く培われた技術で医学に貢献する



株式会社 田中医科器械製作所
Tanaka Medical Instruments Co., Ltd.

〒114-0012 東京都北区田端新町2-14-18
TEL.03-3894-7810 FAX.03-3894-7795
<http://www.e-tanaka.co.jp>